

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável com Janela de Visualização

Bolsa coletora drenável com janela de visualização

Descrição

- As Placas Protetoras de Pele e as Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização são partes integrantes do sistema de duas peças para estomia.
- As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização foram projetadas para coletar o efluente proveniente de estomias de eliminação. Elas podem ser transparentes ou opacas e possuir filtro. As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização possuem o sistema de fechamento InvisiClose que garante maior conforto e segurança ao usuário.
- São utilizadas em conjunto com as Placas Protetoras de Pele com Accordion Flange™, que permitem que os dedos possam ser colocados entre a barreira protetora de pele e o flange enquanto a bolsa é acoplada, sem exercer pressão no abdômen. A placa protetora de pele deve ser utilizada com o mesmo tamanho de Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável com Janela de Visualização.
- As Placas Protetoras de Pele possuem um adesivo hidrocoloide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico que permite o encaixe das Bolsas Coletoras.
- Para o uso das Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização é obrigatório o uso das placas protetoras de pele.



Marca

ConvaTec®

Composição do Produto

- As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização são confeccionadas com filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de viniletileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos.
- Apresentam um painel de visualização, confeccionado por etileno-metil acrilato (EMA), acetato de viniletileno (EVA), polietileno.
- Espuma de poliuretano laminada a uma tela de poliamida, tratada com carvão ativado (contendo KMnO4) e aglutinante de acrilato (preto).

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável com Janela de Visualização

Bolsa coletora drenável com janela de visualização

Características e Ações do Produto

1. Preparação da Pele

Suas mãos e a pele ao redor da estomia devem estar limpas, secas e livres de substâncias oleosas antes da aplicação de qualquer sistema coletor para estomia.

2. Preparação das Placas Protetoras de Pele

a. Placa Protetora de Pele Recortável

Utilizando o guia fornecido, selecione uma placa com uma abertura que seja pelo menos 13mm (1/2 in) maior do que o diâmetro máximo da estomia.

Trace o contorno exato da estomia sobre o papel protetor que cobre a placa.

Corte a placa protetora de pele ao longo da linha tracejada, deixando pelo menos 7mm (1/4 in) de placa protetora entre o orifício inicial e o flange. Remova o papel da placa.

b. Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável

Não remova o papel protetor da porção adesiva da placa/ barreira de pele. A placa/ barreira deverá ser moldada ao formato e tamanho da estomia sem o uso de tesouras.

Para personalizar a abertura da estomia, insira os polegares (ou dedos) na borda do orifício inicial e comece a enrolar a parte adesiva para trás. Use os polegares (ou dedos) para continuar a enrolar o adesivo até que se crie uma abertura do tamanho desejado e no formato da estomia.

O adesivo deverá ser enrolado. Não estique, puxe ou corte o adesivo para torná-lo maior. Aplicar imediatamente após a moldagem.

3. Aplicação da Placa Protetora de Pele

Remova o papel protetor da porção adesiva da barreira protetora. Centralize a abertura da barreira protetora sobre a estomia e aplique a barreira sobre a pele, pressionando por 30 segundos. Caso a placa escolhida possua adesivo de apoio, remova o restante do papel protetor da porção adesiva. Alise suavemente a superfície da barreira protetora, certificando-se de remover quaisquer rugas que possam ter surgido durante a aplicação.

Pressione o adesivo enrolado próximo à estomia em movimentos circulares; faça esse movimento por 30 segundos. Se estiver usando uma placa protetora de pele moldável, além dos passos anteriores, pressionar o adesivo enrolado com movimentos circulares em direção à estomia por 30 segundos.

Usar enquanto estiver confortável e seguro. O tempo de uso pode variar.

4. Aplicação da Bolsa Coletora à Placa Protetora de Pele

Antes de aplicar a bolsa coletora deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre em seu interior, abrindo-a delicadamente.

Para a fixação da bolsa à placa protetora, proceda conforme as figuras a seguir:

Para garantir a vedação, alinhe o flange da bolsa ao flange da placa protetora de pele, pressionando o seu contorno até ouvir os cliques para assegurar-se do completo encaixe.

5. Aplicação da Bolsa Coletora à Placa Protetora de Pele com Accordion Flange™

Antes de aplicar a bolsa deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre em seu interior, abrindo-a delicadamente.

Para garantir a vedação, segure o flange com três dedos das duas mãos, conforme figura ao lado e alinhe o flange da placa com o flange da bolsa coletora.

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável com Janela de Visualização

Bolsa coletora drenável com janela de visualização

Começando pela parte inferior, pressione gentilmente o contorno dos flanges até ouvir os cliques para assegurar-se do completo encaixe. Puxe gentilmente a bolsa coletora para garantir que a placa protetora está bem segura no lugar.

6. Fechamento da Bolsa Coletora

Dobre a bolsa a partir das tiras brancas na extremidade até que os conectores plásticos fiquem sobrepostos. Pressione os conectores em toda a sua largura e aperte até sentir que estão bem fechados. Para maior segurança, utilize o bolso para ocultar o sistema de fecho, ou dobre a aba para baixo, em volta da zona de saída da bolsa.

7. Informação sobre Bolsas Coletoras com filtros

Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.

8. Esvaziamento das Bolsas Coletoras Drenáveis

Desenrole o sistema de fecho da bolsa e abra a saída apertando lateralmente ambas as tiras brancas que se encontram na extremidade da mesma. Esvazie a bolsa coletora.

9. Remoção da Bolsa Coletora

Desencaixe o flange da bolsa conectada ao flange da placa, puxando-o delicadamente com uma mão ao mesmo tempo em que segura a placa protetora aderida à pele com a outra mão.

10. Remoção da Placa Protetora de Pele

Com ambas as mãos, puxe gentilmente a placa protetora da pele, removendo-a cuidadosamente para não ferir a pele.

Recomendações de Uso

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

Advertências

- Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.
- Para o uso das Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização é obrigatório o uso das placas protetoras de pele (registrado e vendido separadamente), conforme descrito no modo de uso do produto, portanto as instruções de uso estarão disponíveis somente nas embalagens das placas protetoras de pele (registrado e vendido separadamente), a fim de facilitar o uso correto dos produtos objetos deste registro.

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável com Janela de Visualização

Bolsa coletora drenável com janela de visualização

- **Atenção:** Os pacientes com uma urostomia plana, quando associada a megaureteres e na ausência de um reservatório urinário, devem ter conhecimento de que foram relatados casos de adesivo encontrado no trato urinário. Inicie o tratamento clínico adequado e avalie o uso continuado do produto adesivo caso de detecte a presença de uma massa.
- Este produto é de uso único (descartável) e não deve ser reutilizado. A sua reutilização pode levar ao aumento do risco de infecção e/ou contaminação cruzada. As propriedades físicas do dispositivo podem ser afetadas e não ser as mais aconselhadas para o uso pretendido.
- **Importante:** Um profissional da saúde deverá avaliar a necessidade de placa protetora de pele convexa antes do uso.
- O adesivo de apoio pode causar irritação da pele em usuários de fraldas. Se ocorrer qualquer irritação, descontinue o uso e consulte um profissional da saúde.
- A pele periestomia deve estar limpa, seca e livre de qualquer solvente ou substâncias gordurosas. Proteja a estomia contra trauma ou lesão.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020084	5 anos	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
421747	Indisponível	Indisponível	0000330767	45mm	10 unidades
421748	Indisponível	Indisponível	0000330768	57mm	10 unidades
421749	Indisponível	Indisponível	0000330769	70mm	10 unidades



Fabricante Legal:
ConvaTec Limited – Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-OC34
V.2

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.