

ESENTA Lenço Barreira Protetora

Lenço Protetora Spray



Descrição

ESENTA Lenço Barreira Protetora é um lenço não estéril, branco, de um material não trançado, saturado com uma combinação líquida para a proteção da pele contra os danos associados aos resíduos do corpo, como fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos. Este produto deve ser utilizado na pele ao redor dos estomas e na pele ao redor de feridas, cria uma superfície limpa sem afetar a aderência dos produtos que serão utilizados na pele.

Marca

ESENTA™ ConvaTec®

Composição do Produto

O ESENTA Lenço Barreira Protetora é composto por um lenço confeccionado em viscose e poliéster, disiloxisano, trimetilsiloxisilicato e zanthoxylum bungeanum. O sachê contém um fluido de silicone.

Características e Ações do Produto

ESENTA lenço barreira protetora cria uma superfície limpa sem afetar a aderência dos produtos que serão utilizados na pele. Acalma a pele vermelha e irritada, sem ardor. Reduz o prurido. Produto hipoalergênico.

Recomendações de Uso

ESENTA lenço barreira protetora é indicado para a proteção da pele contra os danos associados aos resíduos do corpo, como fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos. Este produto deve ser utilizado na pele ao redor dos estomas e na pele ao redor de feridas. Recomendado somente para uso externo, devendo ser evitada a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina) e direta no leito das feridas.

ESENTA Lenço Barreira Protetora

Lenço Protetora Spray

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- O fabricante recomenda o uso único.
- A reutilização pode acarretar o risco aumentado de infecção e contaminação cruzada. As propriedades físicas do produto poderão deixar de ser as ideais para o fim a que se destinam.
- Evite a utilização direta no leito das feridas;
- Evitar a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina);
- Em caso de dúvida, teste o produto em uma pequena área antes da utilização;
- Caso ocorra irritação cutânea, interrompa a utilização e consulte um profissional da saúde;
- Apenas para uso externo.
- Não usar o produto se a embalagem estiver violada.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Cadastro Nº 80523029020	4 anos	Proteja da luz solar. Não exponha a temperaturas superior a 50°C.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
423392	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Lenço	25
423282	1729195	768455170029	Indisponível	Lenço	30



Fabricante:
ConvaTec Inc -
Estados Unidos



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do Registro/Notificação:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ:
09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT- SKC08
V3

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.