

Convamax Curativo Superabsorvente

Curativo Superabsorvente não adesivo



Descrição

O Convamax Curativo Superabsorvente não adesivo é uma cobertura estéril, para uso em feridas com forte exsudação e que possui 3 camadas, sendo: uma camada de polipropileno, permeável ao vapor e resistente à água, que atua como uma barreira de proteção, uma camada intermediária de almofada superabsorvente (SAP) e uma camada de fibra absorvente adaptável, que auxilia no contato íntimo com a ferida. A construção do curativo, em 3 camadas, facilita o gerenciamento de fluido fornecendo um ambiente com umidade ideal para a cicatrização. Além disso, a almofada superabsorvente fornece absorção superior, evitando o contato dos exsudatos e gerenciando as metaloproteinases de matriz, que interferem na cicatrização de feridas. Com isso, é minimizado o risco de maceração e danos à pele peri-ferida, o que promove um fechamento mais rápido da mesma.

O Convamax Curativo Superabsorvente não adesivo foi autorizado pela ANVISA enquadrado na classe de risco III e por isso, pode ser usado, com segurança, em feridas abertas e que só cicatrizam por segunda intenção. Além disso, Convamax é produzido em uma planta produtiva certificada pela ANVISA conforme os critérios de Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos estabelecidos pela RDC nº 665 de 2022, o que garante elevado nível de qualidade e segurança.

Marca

Convamax

Composição do Produto

Polipropileno, Partículas de celulose e poliacrilato de sódio.

Características e Ações do Produto

A construção do curativo, em 3 camadas, facilita o gerenciamento de fluido fornecendo um ambiente com umidade ideal para a cicatrização. Além disso, a almofada superabsorvente, de partículas de celulose e poliacrilato de sódio é capaz de absorver um mínimo de 172 g/100 cm² podendo chegar até 181 g/100 cm², o que evita o contato dos exsudatos com a ferida e permite o gerenciamento das metaloproteinases de matriz.

Convamax Curativo Superabsorvente

Curativo Superabsorvente não adesivo

Com isso, é minimizado o risco de maceração e danos à pele peri-ferida, o que promove um fechamento mais rápido da mesma.

Recomendações de Uso

- Úlceras de pressão
- Úlceras de perna
- Úlceras nos pés diabéticos
- Feridas cirúrgicas abertas

Advertências

Não reutilize. Não utilizar caso a embalagem tenha sido previamente aberta ou violada, pois isto pode prejudicar a esterilização do item;
Não corte o curativo, as camadas devem permanecer intactas.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Óxido de Etileno	Registro ANVISA 80523020091	3 anos	Armazenar em locais com a temperatura entre 5 e 25°C. Proteger da luz. Manter seco.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
422566	1727554			7.5 X 7.5CM	10
422567	1727555			10 X 10CM	10
422568	1727556			10 X 20CM	10
422569	1727557			12.5 X 12.5CM	10
422570	1727558			15 X 15CM	10
422571	1727559			15 X 20CM	10
422572	1727560			20 X 20CM	10
422573	1727561			20 X 30CM	10
422574	1727562			20 X 40CM	10



Fabricante:
HuiZhou Foryou
Medical Devices Co.,
Ltd.



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.716



**Detentor do
Registro/Notificação:**
Convatec Brasil Ltda.



**Atendimento ao
Cliente**
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-AWC25 V1

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da Convatec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo Convatec.