


Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável - Accordion Flange

Placa protetora de pele moldável, trilaminada com Accordion Flange

Descrição

- As Sur-Fit Advantage Durahesive Placas Protetoras de Pele Trilaminadas Moldáveis - Accordion Flange e as Bolsas Coletoras Sur-Fit Advantage são partes integrantes do sistema de duas peças para estomia.
- As Placas Protetoras de Pele possuem um adesivo hidrocoloide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico que permite o encaixe das Bolsas Coletoras.
- As Sur-Fit Advantage Durahesive Placas Protetoras de Pele Trilaminadas Moldáveis - Accordion Flange permitem que os dedos possam ser colocados entre a barreira protetora de pele e o flange enquanto a bolsa é acoplada, sem exercer pressão no abdômen.

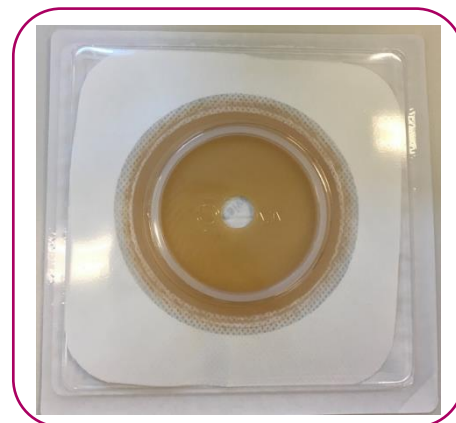

Marca

ConvaTec®

Composição do Produto

- O produto consiste em um anel de suporte de plástico vinilileno (EVA) fino que é aderido na massa Durahesive, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele) e poliisobutileno, borracha isobutílica, óleo mineral, estireno-isopreno- estireno, tetrakis (metileno[3,5-di-tert-butil-4-hidroxihidrocinnamato]) metano e éster de pentaeritriol.
- Possui um disco trilaminado com uma camada de filme de polietileno em relevo entre as duas camadas adesivas.
- A superfície superior da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente.
- Os flanges são confeccionados em acetato de vinilileno.
- O adaptador de baixa pressão é confeccionado em acetato de vinilileno (EVA).

Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável - Accordion Flange

Placa protetora de pele moldável, trilaminada com Accordion Flange

Características e Ações do Produto


1. Preparação da Pele:

Suas mãos e a pele ao redor da estomia devem estar limpas, secas e livres de substâncias oleosas antes da aplicação de qualquer sistema coletor para estomia.


2. Preparação das Placas Protetoras de Pele Trilaminada Moldável:

Não remova o papel protetor da porção adesiva da placa/ barreira de pele. A placa/ barreira deverá ser moldada ao formato e tamanho da estomia sem o uso de tesouras.

Para personalizar a abertura da estomia, insira os polegares (ou dedos) na borda do orifício inicial e comece a enrolar a parte adesiva para trás. Use os polegares (ou dedos) para continuar a enrolar o adesivo até que se crie uma abertura do tamanho desejado e no formato da estomia.

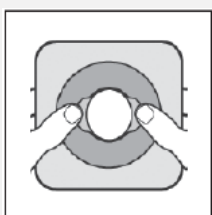

O adesivo deverá ser enrolado. Não estique, puxe ou corte o adesivo para torná-lo maior. Aplicar imediatamente após a moldagem.

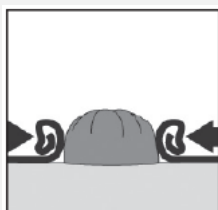

3. Aplicação da Placa Protetora de Pele


Remova o papel protetor da porção adesiva da barreira protetora. Centralize a abertura da barreira protetora sobre a estomia e aplique a barreira sobre a pele, pressionando por 30 segundos. Caso a placa escolhida possua adesivo de apoio, remova o restante do papel protetor da porção adesiva. Alise suavemente a superfície da barreira protetora, certificando-se de remover quaisquer rugas que possam ter surgido durante a aplicação.

Pressione o adesivo enrolado próximo à estomia em movimentos circulares; faça esse movimento por 30 segundos. A placa protetora de pele moldável, além dos passos anteriores, precisa pressionar o adesivo enrolado com movimentos circulares em direção à estomia por 30 segundos.

Usar enquanto estiver confortável e seguro. O tempo de uso pode variar.

Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável - Accordion Flange


Placa protetora de pele moldável, trilaminada com Accordion Flange

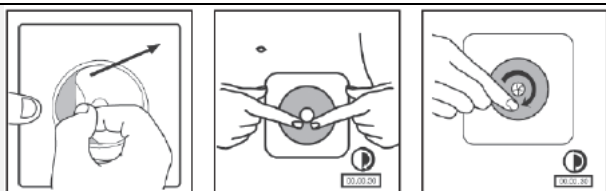


4. Aplicação da Bolsa Coletora à Placa Protetora de Pele

Antes de aplicar a bolsa coletora deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre em seu interior, abrindo-a delicadamente.

Para a fixação da bolsa à placa protetora, proceda conforme as figuras a seguir:

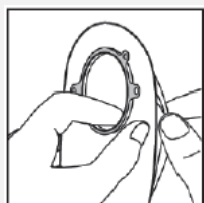


Para garantir a vedação, alinhe o flange da bolsa ao flange da placa protetora de pele, pressionando o seu contorno até ouvir os cliques para assegurar-se do completo encaixe.

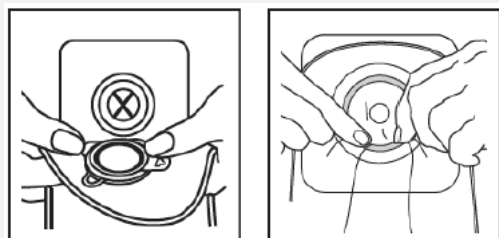

5. Aplicação da Bolsa Coletora à Placa Protetora de Pele com Accordion Flange™


Antes de aplicar a bolsa deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre em seu interior, abrindo-a delicadamente.

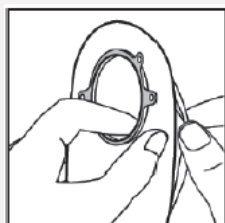


Para garantir a vedação, segure o flange com três dedos das duas mãos, conforme figura ao lado e alinhe o flange da placa com o flange da bolsa coletora.

Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável - Accordion Flange


Placa protetora de pele moldável, trilaminada com Accordion Flange

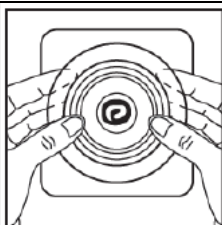

Começando pela parte inferior, pressione gentilmente o contorno dos flanges até ouvir os cliques para assegurar-se do completo encaixe. Puxe gentilmente a bolsa coletora para garantir que a placa protetora está bem segura no lugar.

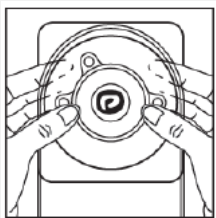

6. Fechamento da Bolsa Coletora: dobre a bolsa a partir das tiras brancas na extremidade até que os conectores plásticos fiquem sobrepostos. Pressione os conectores em toda a sua largura e aperte até sentir que estão bem fechados. Para maior segurança, utilize o bolso para ocultar o sistema de fecho, ou dobre a aba para baixo, em volta da zona de saída da bolsa.

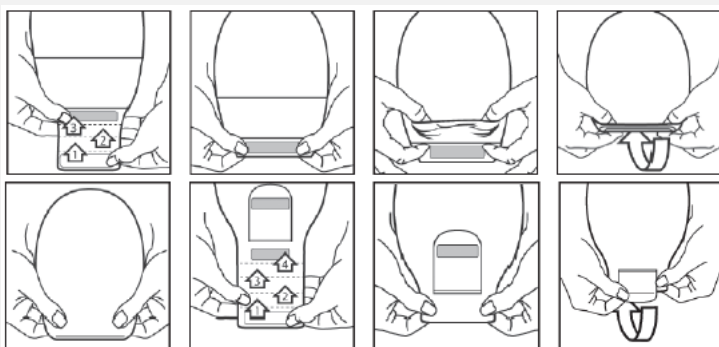

7. Informação sobre Bolsas Coletoras com filtros


Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.

8. Esvaziamento das Bolsas Coletoras Drenáveis

Desenrole o sistema de fecho da bolsa e abra a saída apertando lateralmente ambas as tiras brancas que se encontram na extremidade da mesma. Esvazie a bolsa coletora.


Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável - Accordion Flange

Placa protetora de pele moldável, trilaminada com Accordion Flange

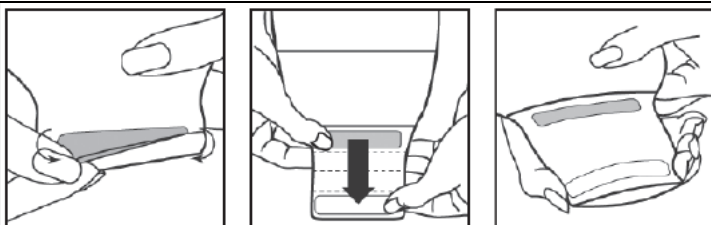

9. Remoção da Bolsa Coletora

Desencaixe o flange da bolsa conectada ao flange da placa, puxando-o delicadamente com uma mão ao mesmo tempo em que segura a placa protetora aderida à pele com a outra mão.

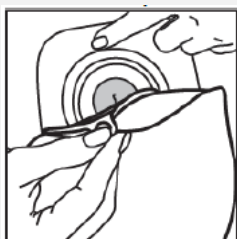

10. Remoção da Placa Protetora de Pele

Com ambas as mãos, puxe gentilmente a placa protetora da pele, removendo-a cuidadosamente para não ferir a pele.



Recomendações de Uso

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

Advertências

- Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.
- Atenção: Os pacientes com uma urostomia plana, quando associada a megaureteres e na ausência de um reservatório urinário, devem ter conhecimento de que foram relatados casos de adesivo encontrado no

Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável - Accordion Flange

Placa protetora de pele moldável, trilaminada com Accordion Flange

trato urinário. Inicie o tratamento clínico adequado e avalie o uso continuado do produto adesivo caso de detecte a presença de uma massa.

- Este produto é de uso único (descartável) e não deve ser reutilizado. A sua reutilização pode levar ao aumento do risco de infecção e/ ou contaminação cruzada. As propriedades físicas do dispositivo podem ser afetadas e não ser as mais aconselhadas para o uso pretendido.
- Importante: Um profissional da saúde deverá avaliar a necessidade de placa protetora de pele convexa antes do uso.
- O adesivo de apoio pode causar irritação da pele em usuários de fraldas. Se ocorrer qualquer irritação, descontinue o uso e consulte um profissional da saúde.
- A pele periestomia deve estar limpa, seca e livre de qualquer solvente ou substâncias gordurosas. Proteja a estomia contra trauma ou lesão.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020082	5 anos	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
421039	Indisponível	10768455192172	0000330764	57mm 13x22mm	10 unidades
421040	Indisponível	10768455192189	0000330765	57mm 22x33mm	10 unidades
421041	Indisponível	768455192199	0000330766	70mm 33x45mm	10 unidades



Fabricante Legal:
ConvaTec Limited – Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-OC32
V.2

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.