

DuoDERM® Extra Fino

Curativo extra fino estéril com fórmula de gel controlada, autoadesivo e absorvente

Descrição

DuoDERM® Extra Fino é um curativo estéril com fórmula de gel controlada, altamente flexível para uso em feridas secas ou ligeiramente exsudativas. Interage com a umidade da ferida, formando um gel macio que permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém-formados. DuoDERM® Extra Fino também contribui para proteger a ferida de contaminação bacteriana e de outras contaminações externas.



Marca

DuoDERM® ConvaTec®

Composição do Produto

Gelatina, carboximetilcelulose sódica, pectina, poliisobutileno, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, metileno 3,5-di-tert-butil-4-hidroxicinamato, éster de pentaeritritol, óleo mineral e poliuretano.



Características e Ações do Produto

- Os curativos DuoDERM® fornecem o controle de umidade adequado ao leito da ferida.
- Desenvolvido para diminuir o risco de causar danos à pele devido as forças de fricção e cisalhamento.
- O curativo DuoDERM® Extra Fino pode ser utilizado como um curativo de hidrocoloide primário para feridas secas, com pouco exsudato e para prevenção de lesões por pressão.
- Um filme fino de poliuretano fornece uma barreira contra bactérias e vírus, enquanto o curativo permanece intacto e sem vazamento.
- O filme proporciona uma barreira à prova de água sobre o curativo.
- O curativo pode ser removido sem causar danos ao tecido recém-formado.
- É desenvolvido para diminuir o risco de uma ruptura da pele devido à fricção e cisalhamento que podem ocorrer no paciente acamado.
- Pode ser utilizado no corpo como um curativo primário ou secundário.
- Pode ser utilizado em fissuras da pele e feridas superficiais, feridas secas e com pouco exsudato, tecidos recém-formados ou em uma pele com risco de ruptura por fatores internos como incontinência urinária e/ou fecal ou pelas forças de fricção, cisalhamento ou pressão.

DuoDERM[®] Extra Fino

Curativo extra fino estéril com fórmula de gel controlada, autoadesivo e absorvente

Recomendações de Uso

Indicações:

- Tratamento de lesões de pele superficiais, secas ou ligeiramente exsudativas.
- Feridas pós-cirúrgicas.
- Como curativos protetores na prevenção de lesões de pele.

Instruções de uso:

- Os curativos DuoDERM[®] Extra Fino são estéreis e devem, portanto, ser manipulados de forma apropriada.
- Selecionar um curativo que ultrapasse a borda da ferida em pelo menos 3 cm.
- Limpar a ferida de acordo com os procedimentos convencionais. Irrigar com solução salina e secar a pele adjacente para eliminar qualquer substância gordurosa.
- Retirar o papel protetor do lado de trás do curativo, minimizando o contato dos dedos com a superfície adesiva.
- Aplicar o curativo sobre a ferida com um movimento circular, evitando esticá-lo.
- Alisar o curativo com as mãos para se assegurar da sua adesão, principalmente nas bordas.
- Para melhor aderência em locais anatômicos, pode-se utilizar um adesivo hipoalergênico ao redor das bordas do curativo.

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Não deve ser utilizado em indivíduos sensíveis ou que tiverem qualquer reação alérgica ao curativo ou a um dos seus componentes.
- O curativo DuoDERM[®] Extra Fino pode permanecer aplicado até no máximo 7 dias, desde que não haja incômodo, vazamento de exsudato ou sinais clínicos de infecção.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Radiação gama	Registro ANVISA 80523020014	5 anos	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

DuoDERM® Extra Fino

Curativo extra fino estéril com fórmula de gel controlada, autoadesivo e absorvente

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
187955	1197973	768455106912	265758	10 x 10 cm	10
187901	1197975	768455102785	265767	7,5 x 7,5 cm	20
187900	1197976	768455102778	265755	10 x 5 cm	20
187932	1221491	768455102815	265765	4,4 x 3,8 cm – mini	20
187902	1221490	768455102792	265760	10 x 15 cm – oval	10
187957	1221488	768455106929	265761	15 x 15 cm	10
187903	1221489	768455102808	265762	15 x 18 cm – triangular	10
187961	1221679	Indisponível	265763	20 x 5 cm	10



Fabricante Legal:
ConvaTec Limited – Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT- AWC10
V.5

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.