

Kaltostat® Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio

Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio

Descrição

Kaltostat® é um curativo estéril, de não tecido de fibras de alginato de cálcio e sódio, macio, de cor branca a quase branca, em formato de placa ou fita. As fibras de alginato absorvem o exsudato da ferida e transformam-se em uma camada firme de gel.




Marca

Kaltostat® ConvaTec®

Composição do Produto

Fibras de alginato de cálcio e sódio.

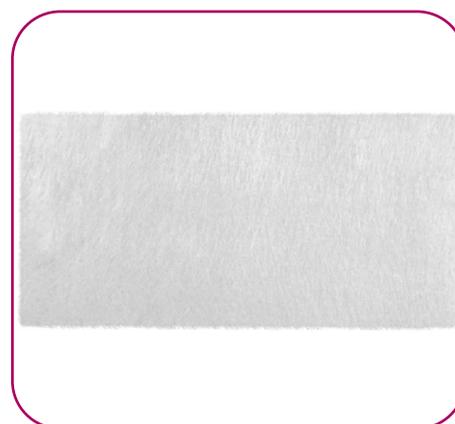

Características e Ações do Produto

- Kaltostat® foi projetado para criar um ambiente úmido que facilita a cicatrização de feridas.
- O gel forma um ambiente úmido na interface com a ferida, e permite a remoção sem trauma, praticamente sem danos para o tecido recém-formado.
- Em contato com uma ferida hemorrágica, Kaltostat® promove hemostasia.

Recomendações de Uso

- **Kaltostat® pode ser utilizado em:** pequenas abrasões, pequenas lacerações e queimaduras superficiais. Sob a supervisão de um profissional de saúde: úlceras de perna (úlceras de estase venosa, úlceras arteriais e úlceras de perna de etiologia mista), úlceras diabéticas e úlceras por pressão (parcial e total), áreas doadoras, incisões pós-cirúrgicas deixadas para cicatrização por segunda intenção e feridas externas causadas por trauma.
- **Outras indicações:** manejo local de feridas hemorrágicas: lacerações, abrasões, sangramento de nariz, extração de dentes e após desbridamento cirúrgico; absorção de exsudato em feridas oncológicas, tais como tumores cutâneos fungóides, carcinoma fungóide, metástases cutâneas e Sarcoma de Kaposi.

Kaltostat® Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio

Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Kaltostat® é um curativo primário que deve ser utilizado com um curativo secundário de cobertura.
- Dependendo das características da lesão o curativo pode permanecer no lugar até 7 dias.
- Este produto é de uso único e estéril, qualquer porção não utilizada do curativo após abertura da embalagem deve ser descartada.
- Kaltostat® não deve ser usado em indivíduos com conhecida sensibilidade ao curativo ou seus componentes. Kaltostat® não é indicado como esponja cirúrgica e para feridas intensamente hemorrágicas.
- Não está recomendado o uso de Kaltostat em crianças com idade inferior a 12 meses.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Radiação gama	Registro ANVISA Nº 80523020007	3 anos	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada. Proteger da luz.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
168210	1703038	76845508114	265724	5 x 5 cm	10
168212	1703039	768455081158	265727	7,5 x 12 cm	10
168214	1703040	768455081110	265725	10 x 20 cm	10
168215	1703041	768455081127	265726	15 x 25 cm	10
168117	1703037	768455081165	265720	Fita - 2 gramas	5



Fabricante Legal:
ConvaTec Limited – Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-AWC15
V.6

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.