

Diamonds™ Sachês Gelificantes para Controle de Odor

Sachês Gelificantes para Controle de Odor



Descrição

Convatec Diamonds™ são sachês para serem introduzidos no interior bolsa de ostomia no caso de uma ileostomia e sua ação é solidificar o conteúdo líquido e ajudar a reduzir ou eliminar o excesso de gases presentes.

Marca

Diamonds™ Convatec®

Composição do Produto

- Poliacrilato de sódio (função: agente solidificante/gelificante)
- Carvão ativado (função: controle super absorvente)

Características e Ações do Produto

- Gelifica o conteúdo de bolsas de ileostomia proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente;
- Ajuda a prevenir possíveis vazamentos e transtornos relacionados;
- Reduz o inchaço da bolsa e os ruídos provenientes dos gases;
- Gelifica até 350 ml de líquidos;
- Para ser usado durante o dia e a noite;
- Previne a possibilidade de o filtro da bolsa ficar entupido por fezes líquidas;
- Reduz e controla odores indesejáveis através do Sistema de Controle de Odor ActiveOne™.
- Cada sachê contém 2,5 g do produto.

Recomendações de Uso

- Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.
- Colocar uma unidade do sachê no interior da bolsa.
 - O sachê não deve ser aberto. Esvaziar e descartar o conteúdo da bolsa da forma habitual.

Diamonds™ Sachês Gelificantes para Controle de Odor

Sachês Gelificantes para Controle de Odor

- Sachês adicionais podem ser adicionados pela abertura da bolsa após seu esvaziamento.
- A abertura da bolsa pode parecer mais escura que o normal e/ou apresentar manchas pretas.
- Descontinuar o uso em caso de monitoração da cor do efluente.
- Não é indicado para casos de urostomia.

Advertências

- Não abra o sachê.
- Esvaziar e descartar o conteúdo da bolsa da forma habitual.
- A abertura da bolsa pode parecer mais escura que o normal e/ou apresentar manchas pretas. Esse é um indicador visível do Sistema de Controle de Odor ActiveOne™.
- Descontinuar o uso em caso de monitoração da cor do efluente.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Produto isento de registro na ANVISA.	4 anos.	Conservar em local fresco e seco.

ICC	SAP	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
420791	1706529	5060148230085	253520	Sachês Gelificantes	100 sachês



Fabricante:
ConvaTec Limited. -
Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do Registro/Notificação:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ:
09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-OC29
V6

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.