

# ESENTA™ Desodorante Lubrificante

## Desodorante Lubrificante Spray

### Descrição

**ESENTA™ Desodorante Lubrificante** é destinado para aplicação em bolsas de ostomia, a fim de melhorar a passagem das fezes para dentro da bolsa e controlar odores via degradação catalítica e decomposição de moléculas de odor.



### Marca

ESENTA™ ConvaTec®

### Composição do Produto

ESENTA™ Desodorante Lubrificante é composto de água, óleo de pinho, óleo de eucalipto, óleo de eucalipto gunii, extrato de lavanda, monolaurato de sorbitano e glicerol.

### Características e Ações do Produto

O princípio de funcionamento deste agente é a formação de uma vedação do conteúdo das bolsas de ostomia com o uso de uma superfície lipofílica (oleosa) e, ao mesmo tempo, a degradação catalítica de moléculas odoríferas.

### Recomendações de Uso

- O dispositivo médico é destinado para aplicação em bolsas de ostomia, a fim de melhorar a passagem das fezes para dentro da bolsa e controlar odores.
- ESENTA™ Desodorante Lubrificante é seguro para a roupa e para o ambiente.

#### Modo de uso:

- 1 - Agite antes de usar.
- 2 - O dispositivo médico deve ser aplicado diretamente na bolsa de ostomia antes de usar, inserindo o bico firmemente na abertura.
- 3 - Pulverize 3-5 vezes.

# ESENTA™ Desodorante Lubrificante

## Desodorante Lubrificante Spray

### Advertências

#### Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso.

- Em contato com os olhos lava-os imediatamente e cuidadosamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Nunca aplicar diretamente sobre feridas abertas.
- Usar somente até a data indicada na embalagem do produto.
- Não utilizar se algum ingrediente causar qualquer reação alérgica conhecida.
- Esse dispositivo médico é compatível com aparelhos usados por pacientes ostomizados.
- O dispositivo não é inflamável, não é explosivo e não requer tratamento especial.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020093	2 anos	Armazenar de 0 a 40 °C e proteger da luz solar direta.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
423574	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Frasco de polietileno - Spray 236 ml	1



**Fabricante Legal:**  
ALP ECOLOGY S.R.O.



**Responsável Técnico:**  
Carla Viotto Belli  
CRF-SP nº 16.715



**Importador:**  
Convatec Brasil Ltda.  
CNPJ: 09.603.161/0001-44



**Atendimento ao Cliente**  
0800-7276-115



[www.convatec.com](http://www.convatec.com)  
FT- SKC14  
V.0

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.