

Active Life® Bolsa de Urostomia de Uma Peça Recortável

Bolsa de urostomia de uma peça drenável e recortável

Descrição

As **bolsas Active Life®** são dispositivos de uma peça para urostomia compostas por uma barreira protetora de pele Stomahesive® e uma bolsa coletora drenável.

As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.



Marca

Active Life® ConvaTec®
Stomahesive®



Composição do Produto

- **Bolsa Coletora:** Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de vinilileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos.
- **Barreira Protetora da Pele Stomahesive®:** gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente. As placas possuem um anel de suporte, composto de acetato de vinilileno.
- **Torneira de Drenagem:** Acetato vinilileno.

Características e Ações do Produto

- **Proteção da pele:** substâncias hidrocolóides absorvem a umidade.
- São compostas de **válvula anti-refluxo** que permite que a urina flua diretamente dentro da bolsa e não retorne, evitando o contato com o estoma.
- **Multi-medidas:** recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma. O guia de recorte é impresso no papel protetor, facilitando a visualização da medida desejada.
- **Bolsa transparente:** Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens.
- **Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos:** segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.
- Esvaziamento da bolsa fácil e rápido através da **torneira de drenagem dobrável**.

Active Life® Bolsa de Urostomia de Uma Peça Recortável

Bolsa de urostomia de uma peça drenável e recortável

Recomendações de Uso

A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes.

- Limpar a pele periestoma com água e sabão e secar completamente, assegurando-se de que ela esteja livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possam prejudicar a aderência da bolsa.
- Se a superfície da pele periestoma estiver irregular ou enrugada, preencher as depressões ou pregas da pele com pasta Stomahesive. O uso rotineiro da pasta protetora Stomahesive ao redor da base do estoma aumenta o tempo de uso da bolsa.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA BOLSA:

- A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura e não houver sinais de irritação.
- Utilize o guia de medida do papel protetor na parte de trás da barreira adesiva para traçar o contorno do estoma.
- Antes de recortar a barreira adesiva, separe as partes da frente e de trás da bolsa a fim de evitar cortá-las por engano.
- Pressione a barreira protetora contra a pele alisando-a para garantir melhor aderência.
- Antes de remover a bolsa deve ser realizada drenagem total do efluente.

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Atenção: Deve-se ter especial cuidado ao usar produtos adesivos ao redor de urostomias planas, especialmente se associada à megaureter. Em raras ocasiões, os informes clínicos têm documentado a presença de agentes adesivos no trato urinário destes pacientes. Nesses casos, deve-se avaliar a continuidade do uso do produto e iniciar tratamento clínico apropriado.
- Em caso de irritação da pele, consulte um profissional da saúde.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA 80523020059	5 anos	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

Active Life® Bolsa de Urostomia de Uma Peça Recortável

Bolsa de urostomia de uma peça drenável e recortável

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
64927	1023423	768455029778	265712	19 - 45 mm	10 bolsas



Fabricante Legal:

ConvaTec Limited – Reino Unido



Responsável Técnico:

Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:

Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente

0800-7276-115



www.convatec.com

FT-OC19

V.5

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.