


Cure Ultra®

Cateter Urinário Intermitente Masculino

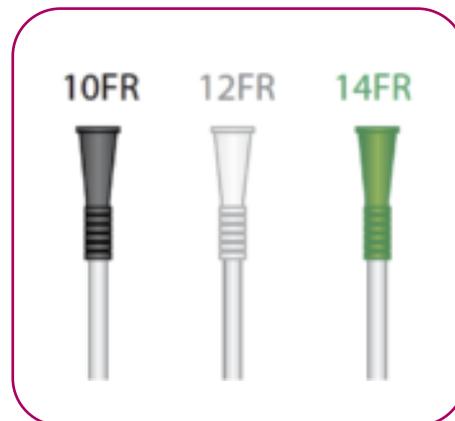

Descrição

O Cateter Urinário Intermitente Cure Ultra® Masculino é um sistema de cateter aberto pré-lubrificado que permite a conveniência do paciente quando o cateterismo é necessário fora de casa.

Marca

Cure®

Composição do Produto

- Ponta: Polietileno Cloreto de Vinila (PVC)
- Tubo: Polietileno Cloreto de Vinila (PVC)
- Conector: Cicloexanona
- Funil: Polietileno Cloreto de Vinila (PVC)
- Gel Lubrificante: Lubrajel MG (lubrificante transparente, solúvel em água), composto por: glicerina, água, propileno glicol, poliacrilato de sódio, ácido poliacrílico, metilparabeno e propilparabeno.

Características e Ações do Produto

Após ser inserido pelo orifício corporal, uretra, assim que os orifícios de drenagem presentes na ponta do cateter atingirem o interior da bexiga, a urina passará a fluir pelo interior (lúmen) do tubo do cateter até sair pelo funil.

Recomendações de Uso

Como o Cateter Urinário Intermitente Cure Ultra Masculino não inclui dispositivo coletor, este deverá ser usado para permitir que a urina flua diretamente para um vaso sanitário ou outro sistema de coleta.

Cure Ultra®

Cateter Urinário Intermitente Masculino

Advertências

- Contate um profissional da saúde se não houver fluxo de urina ou ocorrerem outras complicações durante ou após o uso (por exemplo, dor, inserção ou remoção difícil, sangramento, sinais de infecção do trato urinário ou corrimento).
- O fabricante recomenda o USO ÚNICO deste produto, não reutilize ou reinsira o dispositivo. Isso pode levar a um aumento do risco de infecção, transmissão de vírus/bactérias, sangramento, dano tecidual ou dor;
- A esterilidade é garantida, salvo nos casos em que a embalagem selada esteja danificada ou seja aberta antes do uso. Não use o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta antes do uso e descarte o dispositivo de acordo com os regulamentos locais;
- O cateter deve ser utilizado imediatamente após ser removido da embalagem;
- O cateter é lubrificado e pronto para uso assim que retirado da embalagem. O cateter nunca deve ser novamente lubrificado;
- Se durante a utilização deste dispositivo ou como resultado da sua utilização ocorrer um incidente grave, comunique-o ao detentor do registro e à autoridade competente.
- Não utilize em conjunto com irrigação ou instilação.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Óxido de Etileno	Notificação ANVISA Nº 80523020097	3 anos	Armazenar o produto dentro da embalagem original, lacrada e em temperatura ambiente, com a faixa de temperatura entre 4° a 30°C.

ICC	SAP	EAN	SIMPRO	Características	Unidades por caixa
				Ponta do Cateter	Tamanho
510810	1735466	815947021045	0000352728	Reta	10
510812	1735468	815947021052	0000352729	Reta	12
510814	1735470	815947021069	0000352730	Reta	14



Fabricante
 Convatec Limited -
 Reino Unido
 Convatec Inc. - EUA



Responsável Técnico
 Carla Viotto Belli
 CRF-SP nº 16.715



Detentor do Registro/Notificação
 Convatec Brasil Ltda.
 CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
 0800-7276-115



www.convatec.com
 FT-CCC18
 V3

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da Convatec. Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro. Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo Convatec.