

ESENTA - Spray Removedor de Adesivo 50ml

Liberador de adesivo



Descrição

ESENTA - Spray Removedor de Adesivo 50ml é designado a criar uma fina camada de silicone entre o adesivo e a pele, este fluido é claro e incolor e é de muito baixa viscosidade, espalha facilmente e evapora rapidamente após aplicação na pele, não deixando nenhum resíduo. O spray removedor destina-se a ajudar na remoção traumática de curativos/dispositivos aderidos (por exemplo, adesivo residual, fita adesiva, dispositivos para ostomia), o que também pode ajudar na proteção da pele contra irritação e/ou escoriação causadas pela remoção traumática de adesivos.

Marca

ESENTA™ ConvaTec®

Composição do Produto

O **ESENTA™ Spray Removedor de Adesivo 50ml** é composto por hexamethyldisiloxane/dissiloxano e trisiloxane/trissiloxano.

Características e Ações do Produto

ESENTA™ Spray removedor de adesivo é um líquido claro, incolor, livre de partículas, livre de sujeira e matéria estranha (produto acabado) embalado em uma lata de alumínio. **EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL**

Recomendações de Uso

ESENTA Spray removedor de adesivo é usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos médicos em contato com a pele com a pele íntegra e sem ardor.

Modo de uso:

1. Aplicar em torno da extremidade do adesivo e aguarde alguns segundos.
2. Descole cuidadosamente o adesivo da pele utilizando spray adicional para facilitar a remoção, se necessário.

ESENTA - Spray Removedor de Adesivo 50ml

Liberador de adesivo

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Usar apenas conforme indicado.
- Evite a utilização direta no leito das feridas.
- Evitar utilizar em zonas delicadas ou em áreas sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz, vagina).
- Em caso de dúvida, testar em uma pequena área antes da utilização.
- Caso ocorra irritação cutânea, interrompa a utilização e consulte um profissional de saúde.
- Evite a inalação.
- Apenas para uso externo.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Pode explodir se aquecido.
- Manter afastado de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas vivas e outras fontes de ignição. Não fumar.
- Não furar nem queimar, mesmo após a utilização.

| Método de Esterilização | Registro Sanitário | Prazo de Validade | Cuidados de Conservação |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| Não estéril | 25351.574933/2021-12 (cosmético) | 4 anos | Conservar ao abrigo de luz solar e a temperatura inferior à 50°C. |

| ICC | Brasíndice | EAN | SIMPRO | Característica | Unidades por caixa |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| 423289 | 1729206 | 768455170135 | Indisponível | Lata de alumínio - Spray 50 ml | 1 |



Fabricante:
ConvaTec Limited -
Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do Registro/Notificação:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-SKC12
V4

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec. Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações. As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro. Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.