

# ESENTA - Barreira Protetora Spray

Barreira protetora ou filme protetor da pele



## Descrição

ESENTA Barreira Protetora Spray forma uma resina de silicone que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos, podendo ser usado na troca de bolsas de ostomia e curativos, ao redor dos estomas e feridas.

## Marca

ESENTA™ ConvaTec®

## Composição do Produto

ESENTA Barreira Protetora Spray é composto por disiloxisano, Trimetilsiloxisilicato e zanthoxylum bungeanum.

## Características e Ações do Produto

Formulação: Formulação límpida, fluída, volátil, sem odor e incolor.

Barreira Protetora da Pele: forma uma barreira oclusiva que repele a umidade e atua como barreira contra fatores irritantes como fezes e urina.

Produto hipoalergênico.

## Recomendações de Uso

ESENTA barreira protetora spray é indicado para a proteção da pele contra os danos associados aos resíduos do corpo, como fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos. Este produto deve ser utilizado na pele ao redor dos estomas e na pele ao redor de feridas. Recomendado somente para uso externo, devendo ser evitada a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina) ou direta no leito das feridas e a inalação do produto.

Modo de utilização:

- Limpe e seque a pele completamente;
- Segure a aproximadamente 10 cm da área a ser tratada.

# ESENTA - Barreira Protetora Spray

## Barreira protetora ou filme protetor da pele

- Aplique uma camada uniforme num movimento de passagem.
  - Certifique-se de que a área está completamente seca antes de aplicar produtos adesivos, tais como equipamentos ou curativos.
  - Substitua em cada mudança de curativo ou de equipamento para manter a proteção completa.
- A reaplicação é recomendada a cada 12-72 horas, dependendo das condições da superfície da pele. O ESENTA Barreira Protetora Spray não causará um acúmulo de película de barreira na superfície da pele.

### Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- O fabricante recomenda o uso único.
- A reutilização pode acarretar o risco aumentado de infecção e contaminação cruzada. As propriedades físicas do produto poderão deixar de ser as ideais para o fim a que se destinam.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evite a utilização direta no leito das feridas;
- Evitar a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina);
- Em caso de dúvida, teste o produto em uma pequena área antes da utilização;
- Caso ocorra irritação cutânea, interrompa a utilização e consulte um profissional da saúde;
- Apenas para uso externo
- Evite a inalação

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Cadastro 80523029019	2 anos	Proteja da luz solar. Não exponha a temperaturas superior a 50°C.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
423286	1729201	768455170081	Indisponível	Spray 28 ml	1



**Fabricante:**  
ConvaTec Inc -  
Estados Unidos



**Responsável Técnico:**  
Carla Viotto Belli  
CRF-SP nº 16.715



**Detentor do Registro/Notificação:**  
Convatec Brasil Ltda.  
CNPJ:  
09.603.161/0001-44



**Atendimento ao Cliente**  
0800-7276-115



[www.convatec.com](http://www.convatec.com)  
FT- SKC09  
V3

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.