

# Stomahesive® Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele

Pasta preenchedora e barreira protetora de pele

## Descrição

**Stomahesive® Pasta** é um material de enchimento, altamente eficaz como barreira protetora e selante da pele, para uso com dispositivos para cuidados de estomas.



## Marca

Stomahesive® ConvaTec®

## Composição do Produto

Gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, etanol, éster monobutílico do copolímero de éter metilvinílico, anidrido maleico, tris-12-hidroxiestearato de glicerila e triacetato de glicerila.



## Características e Ações do Produto

- Absorção: As substâncias hidrocolóides tem capacidade de absorver a umidade provocada por escoriações, melhorando assim a fixação das placas e bolsas de estomia.
- Utilizada para proteger a pele exposta ao redor de locais de fístulas entre a base do estoma e o orifício da placa protetora.
- Excelente material de enchimento para dobras da pele e superfícies cutâneas irregular.
- Facilmente removível 48 horas após a aplicação.

# Stomahesive® Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele

## Pasta preenchedora e barreira protetora de pele

### Recomendações de Uso

#### Método 1:

- Aplicar um anel da pasta protetora ao redor da base do estoma ou borda da fístula, de cerca de 3 a 6 mm de largura. A pasta deve ser empregada em quaisquer dobras ou superfícies irregulares da pele até que seja obtida uma superfície uniforme.
- Deve-se esperar um minuto até que a pasta seque. Caso seja necessária uma camada adicional, esperar mais um minuto para fixar o dispositivo escolhido sobre a pele.
- A pressão feita na região central do dispositivo, ao redor do estoma, fará com que parte da pasta suba ao redor do estoma criando uma vedação adicional.

#### Método 2:

- Após o preparo do dispositivo para aplicação (medição e corte), retirar o papel protetor siliconizado e aplicar um anel de pasta protetora, de cerca de 3 a 6 mm de largura, ao redor do orifício.
- Esperar um minuto até que a pasta seque.

### Advertências

**Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso impressa no rótulo do mesmo.**

- Não deve ser utilizada por pacientes com conhecida sensibilidade a algum dos componentes do produto.
- Stomahesive® Pasta foi testada em humanos, demonstrando ausência de irritação e sensibilização por contato. Sob o ponto de vista médico, não há nenhuma consideração especial que deva ser detectada como precaução na utilização deste produto.
- Stomahesive® Pasta é indicada somente para uso externo. Contém álcool. Não aplicar diretamente sobre feridas abertas ou úlceras cutâneas. Quando aplicada sobre a pele exposta, tecido escoriado ou com exsudato, poderá ocorrer uma ligeira sensação de ardor. Isto poderá ser eliminado ou diminuído pela prévia aplicação de pó protetor Stomahesive®.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020002	5 anos	Armazenar entre 10°C e 30°C. Limpar o bico do tubo e fechar bem após utilização.

# Stomahesive® Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele

Pasta preenchedora e barreira protetora de pele

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
183910	1231164	Indisponível	1660097	Tubo com 56,7 gramas	1



**Fabricante Legal:**  
ConvaTec Inc. – Estados Unidos



**Responsável Técnico:**  
Carla Viotto Belli  
CRF-SP nº 16.715



**Importador:**  
Convatec Brasil Ltda.  
CNPJ: 09.603.161/0001-44



**Atendimento ao Cliente**  
0800-7276-115



[www.convatec.com](http://www.convatec.com)  
FT-OC24  
V.6

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.