

ESENTA - Lenço Removedor de Adesivo

Lenços removedores de adesivo



Descrição

ESENTA Lenço Removedor de Adesivo contém uma toalha impregnada de fluido de silicone. Este fluido é claro e incolor e, por ser de baixa viscosidade, evapora rapidamente após aplicação na pele. Os removedores de adesivo são indicados para remoção atraumática de adesivos médicos, o que também pode ajudar na proteção da pele contra irritação e/ou escoriação causadas pela remoção traumática de adesivos.

Marca

ESENTA™ ConvaTec®

Composição do Produto

O ESENTA™ Lenço Removedor de Adesivo é composto por viscoso, poliéster, hexamethyldisiloxane/dissiloxano e trisiloxane/trissiloxano.

Características e Ações do Produto

ESENTA™ lenço removedor de adesivo é usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos médicos em contato com a pele íntegra, como por exemplo a região periestoma, e sem ardor, criando uma superfície limpa sem afetar a aderência do próximo equipamento ou curativo. EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL

Recomendações de Uso

ESENTA Lenço removedor de adesivo é usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos médicos em contato com a pele íntegra e sem ardor.

Modo de Uso:

1. Abrir a embalagem e desdobrar o lenço.
2. Aplicar sobre o resíduo de adesivo para removê-lo. Seca em alguns segundos.

ESENTA - Lenço Removedor de Adesivo

Lenços removedores de adesivo

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Usar apenas conforme indicado.
- Evite a utilização direta no leito das feridas.
- Evitar utilizar em áreas sensíveis da pele (olhos, boca, orelha, nariz, vagina).
- Em caso de dúvida, testar em uma pequena área antes da utilização.
- Interromper o uso em caso de irritação.
- Caso ocorra irritação cutânea, interrompa a utilização e consulte um profissional de saúde.
- Este produto destina-se apenas a uma única utilização e não deve ser reutilizado. A reutilização pode conduzir ao risco acrescido de infecção e contaminação cruzada. As propriedades físicas do produto poderão deixar de ser as ideais para o fim a que se destinam.
- Após a utilização, este produto pode representar um risco biológico potencial.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	25351.574511/202147 (cosmético)	4 anos	Conservar ao abrigo de luz solar e a temperatura inferior à 50°C.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
423391	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Lenço	25
423281	1729194	768455170012	Indisponível	Lenço	30



Fabricante:
ConvaTec Limited -
Reino Unido



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do Registro/Notificação:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ:
09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT- SKC11
V4

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.