

# SAF-GEL® Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio

## Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio

### Descrição

SAF-GEL® é um gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso.



### Marca

SAF-GEL® ConvaTec®

### Composição do Produto

Água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, ácido bórico, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, DMDM hidantoína e carboximetilcelulose sódica.



### Características e Ações do Produto

- Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida;
- Apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e necróticas;
- Tem a capacidade de absorver o exsudato da ferida;

### Recomendações de Uso

- SAF-GEL® é indicado no tratamento de úlceras por pressão, úlceras de perna de estase venosa, queimaduras de 1º e 2º grau, cortes, abrasões e lacerações. O gel contendo alginato pode ser usado no controle de úlceras crônicas, incluindo úlceras de pressão de estágio IV.
- Para otimizar a cicatrização, pode-se utilizar SAF-GEL® em conjunto com um curativo que retenha a umidade.

# SAF-GEL® Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio

## Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio

### Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

- Indicado somente para uso externo.
- Após aberto o produto mantém sua eficácia por até 28 dias.
- SAF-GEL® deverá ser trocado diariamente ou quando o curativo que recobre a ferida começar a escorrer ou for retirado para as trocas de rotina. O gel pode ser removido enxaguando-se com solução salina.
- SAF-GEL® não deve ser utilizado por pacientes com conhecida sensibilidade ao gel ou a algum de seus componentes.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Registro ANVISA Nº 80523020016	2 anos	Conservar entre 15 e 30°C.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
145730	1002655	768455107896	61391	1 tubo com 85 gramas	1



**Fabricante Legal:**  
ConvaTec Inc. – Estados Unidos



**Responsável Técnico:**  
Carla Viotto Belli  
CRF-SP nº 16.715



**Importador:**  
Convatec Brasil Ltda.  
CNPJ: 09.603.161/0001-44



**Atendimento ao Cliente**  
0800-7276-115



[www.convatec.com](http://www.convatec.com)  
FT-AWC16  
V.6

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.