

GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermittente Hidrofílico

Cateter Urinário Hidrofílico Feminino



Descrição

GentleCath™ Glide é um Cateter Urinário Hidrofílico, pronto para o uso, estéril, descartável, tubular e flexível, com orifícios polidos e biselados, é inserido através da uretra para a passagem de fluidos da bexiga.

Marca

GentleCath™ ConvaTec®

Composição do Produto

- **Tubo do Cateter:** elastômero a base de poliolefina (POBE) adicionado de aditivos hidrofílicos.
- **Conector:** polivinil cloreto (PVC)
- **Manga de proteção:** polietileno
- **Sachê:** água estéril (esterilização por irradiação beta)
- **Material do sachê:** Tereftalato de polietileno (camada externa) / Filme de alumínio / Polietileno (camada interna).

Características e Ações do Produto

- GentleCath™ é um cateter urinário hidrofílico, pronto para o uso, flexível e tubular que é inserido através da uretra para a passagem de fluidos da bexiga. Os aditivos hidrofílicos estão incorporados na composição do tubo do cateter, tornando a superfície lisa e escorregadia quando hidratado.
- GentleCath é um cateter de uso único para drenagem temporária da bexiga.

Recomendações de Uso

- Se necessário, antes de utilizar, conecte uma bolsa de urina à extremidade afunilada do cateter.
- Não toque na ponta do cateter e use a manga de proteção para minimizar o contato direto com o resto do cateter.

GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermitente Hidrofílico

Cateter Urinário Hidrofílico Feminino

- Aperte o sachê de água no interior da embalagem até que se rompa e cubra o cateter com água. Use em um intervalo de 2 minutos.
- Durante a inserção e a remoção, deslize o cateter sempre de forma lenta e suave. Nunca force o cateter.
- Ao remover o cateter, pare se mais urina começar a fluir. Continue novamente quando a urina parar.
- O adesivo com proteção azul na parte de trás da embalagem pode ser usado para fixá-la à uma superfície durante o uso do cateter.
- Se não houver passagem de urina ou se ocorrerem outras complicações (como, por exemplo, dor, dificuldade de inserção ou remoção, sangramento, sinais de infecção do trato urinário ou secreções), consulte um profissional da saúde.
- Se o cateter for inserido de forma incorreta, o mesmo deverá ser descartado e não reutilizado. Um novo cateter deve ser selecionado para uso.
- Os cateteres usados devem ser sempre descartados.

Advertências

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações, precauções e observações.

- A necessidade de cateterismo intermitente deve ser avaliada por um profissional da saúde tendo em conta as respetivas contraindicações.
- Não usar conjuntamente com processos de irrigação ou instilação.
- Verificar a integridade do cateter antes de o inserir e certificar de que o tamanho é correto relativamente ao indicado na embalagem.
- Selecionar um cateter de substituição, se necessário.
- Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Se necessário, antes de utilizar, ligue uma bolsa de urina à extremidade afunilada do cateter.
- Não toque na ponta do cateter e use a manga de proteção para minimizar o contacto com o resto do cateter.
- Aperte o sachê de água no interior do pacote até que se rompa e cubra com água o cateter. Use num intervalo de 2 minutos.
- Durante a inserção e a remoção, deslize o cateter sempre de forma lenta e suave. Nunca force o cateter.
- Ao remover o cateter, pare se mais urina começar a fluir. Continue novamente quando a urina parar.
- O adesivo redondo azul na parte de trás da embalagem pode ser usado para fixá-la a uma superfície durante o uso do cateter.
- Se não houver passagem de urina ou se ocorrerem outras complicações (como por exemplo, dor, dificuldade de inserção ou de remoção, sangramento, sinais de infeção do trato urinário, ou secreções), consulte um profissional da saúde.
- Se o cateter for inserido de forma incorreta ele deve ser descartado e não reutilizado. Um novo cateter deve ser selecionado para o uso.
- Os cateteres usados devem ser sempre descartados.

GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermittente Hidrofílico

Cateter Urinário Hidrofílico Feminino

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
<ul style="list-style-type: none"> Óxido de Etileno Raio-X <p>Verifique o rótulo para conhecer o método de esterilização aplicado no produto.</p>	Notificação ANVISA Nº 80523020075	3 anos	Mantenha longe do excesso de umidade.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
				Ponta/Tamanho	
421570	1718760	768455205141	0313746	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH8	30
421571	1718761	768455205158	0313747	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH10	30
421572	1718762	768455205165	0313748	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH12	30
421573	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH14	30
421574	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH16	30



Fabricante Legal:
ConvaTec Inc - USA



Responsável Técnico:
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Importador:
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-CCC15
V.6

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.