

# GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermittente Hidrofílico

Cateter Urinário Hidrofílico Masculino



## Descrição

**GentleCath™ Glide** é um Cateter Urinário Hidrofílico, pronto para o uso, estéril, descartável, tubular e flexível, com orifícios polidos e biselados, é inserido através da uretra para a passagem de fluidos da bexiga.

## Marca

GentleCath™ ConvaTec®

## Composição do Produto

- **Tubo do Cateter:** elastômero a base de poliolefina (POBE) adicionado de aditivos hidrofílicos.
- **Conector:** polivinil cloreto (PVC)
- **Manga de proteção:** polietileno
- **Sachê:** água estéril (esterilização por irradiação beta)
- **Material do sachê:** Tereftalato de polietileno (camada externa) / Filme de alumínio / Polietileno (camada interna).

## Características e Ações do Produto

- GentleCath™ é um cateter urinário hidrofílico, pronto para o uso, flexível e tubular que é inserido através da uretra para a passagem de fluidos da bexiga. Os aditivos hidrofílicos estão incorporados na composição do tubo do cateter, tornando a superfície lisa e escorregadia quando hidratado.
- GentleCath é um cateter de uso único para drenagem temporária da bexiga.

## Recomendações de Uso

- Se necessário, antes de utilizar, conecte uma bolsa de urina à extremidade afunilada do cateter.
- Não toque na ponta do cateter e use a manga de proteção para minimizar o contato direto com o resto do cateter.

# GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermittente Hidrofílico

## Cateter Urinário Hidrofílico Masculino

- Aperte o sachê de água no interior da embalagem até que se rompa e cubra o cateter com água. Use em um intervalo de 2 minutos.
- Durante a inserção e a remoção, deslize o cateter sempre de forma lenta e suave. Nunca force o cateter.
- Ao remover o cateter, pare se mais urina começar a fluir. Continue novamente quando a urina parar.
- O adesivo com proteção azul na parte de trás da embalagem pode ser usado para fixá-la à uma superfície durante o uso do cateter.
- Se não houver passagem de urina ou se ocorrerem outras complicações (como, por exemplo, dor, dificuldade de inserção ou remoção, sangramento, sinais de infecção do trato urinário ou secreções), consulte um profissional da saúde.
- Se o cateter for inserido de forma incorreta, o mesmo deverá ser descartado e não reutilizado. Um novo cateter deve ser selecionado para uso.
- Os cateteres usados devem ser sempre descartados.

### Advertências

**Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações, precauções e observações.**

- A necessidade de cateterismo intermitente deve ser avaliada por um profissional da saúde tendo em conta as respetivas contraindicações.
- Não usar conjuntamente com processos de irrigação ou instilação.
- Verificar a integridade do cateter antes de o inserir e certificar de que o tamanho é correto relativamente ao indicado na embalagem.
- Selecionar um cateter de substituição, se necessário.
- Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Se necessário, antes de utilizar, ligue uma bolsa de urina à extremidade afunilada do cateter.
- Não toque na ponta do cateter e use a manga de proteção para minimizar o contacto com o resto do cateter.
- Aperte o sachê de água no interior do pacote até que se rompa e cubra com água o cateter. Use num intervalo de 2 minutos.
- Durante a inserção e a remoção, deslize o cateter sempre de forma lenta e suave. Nunca force o cateter.
- Ao remover o cateter, pare se mais urina começar a fluir. Continue novamente quando a urina parar.
- O adesivo redondo azul na parte de trás da embalagem pode ser usado para fixá-la a uma superfície durante o uso do cateter.
- Se não houver passagem de urina ou se ocorrerem outras complicações (como por exemplo, dor, dificuldade de inserção ou de remoção, sangramento, sinais de infeção do trato urinário, ou secreções), consulte um profissional da saúde.
- Se o cateter for inserido de forma incorreta ele deve ser descartado e não reutilizado. Um novo cateter deve ser selecionado para o uso.
- Os cateteres usados devem ser sempre descartados.

# GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermittente Hidrofílico

## Cateter Urinário Hidrofílico Masculino

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
<ul style="list-style-type: none"> <li>Óxido de Etileno</li> <li>Raio-X</li> </ul> <p><b>Verifique o rótulo para conhecer o método de esterilização aplicado no produto.</b></p>	Notificação ANVISA Nº 80523020075	3 anos	Mantenha longe do excesso de umidade.

ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Característica	Unidades por caixa
421564	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta reta / CH08	30
421565	1718754	768455205097	0313742	Cateter masculino / Ponta reta / CH10	30
421566	1718756	768455205103	0313743	Cateter masculino / Ponta reta / CH12	30
421567	1718757	768455205110	0313744	Cateter masculino / Ponta reta / CH14	30
421568	1718758	768455205127	0313745	Cateter masculino / Ponta reta / CH16	30
421569	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta reta / CH18	30
421907	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta TMNN / CH08	30
421908	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta TMNN / CH10	30
421909	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta TMNN / CH12	30
421910	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta TMNN / CH14	30
421911	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta TMNN / CH16	30
421912	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Cateter masculino / Ponta TMNN / CH18	30



**Fabricante Legal:**  
ConvaTec Inc - USA



**Responsável Técnico:**  
Carla Viotto Belli  
CRF-SP nº 16.715



**Importador:**  
Convatec Brasil Ltda.  
CNPJ: 09.603.161/0001-44



**Atendimento ao Cliente**  
0800-7276-115



[www.convatec.com](http://www.convatec.com)  
FT-CCC16  
V.6

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.